



## ***Návody na použitie jednotlivých prístrojov a nástrojov v súvislosti so službami starostlivosti o ľudské telo***

### **1. Prístroj SCENAR**

#### **Návod na použitie:**

Prístroj v prevádzke môže používať iba určený certifikovaný terapeut.

#### **Ovládanie prístroja:**

Zapnutie a vypnutie prístroja sa vykonáva tlačidlom so znakom obdĺžnika na ľavej strane prístroja, potrebné podržať 3-5 sekúnd, kým nezaznie zvukový signál (krátke pípnutie) a display na prístroji nerozsvieti/ nezhasne. Tlačidlom na pravej strane prístroja so znakom trojuholníka so šípkou je možné prepínať sa medzi možnosťami pre nastavenia parametrov a funkcií prístroja nasledovne, pričom nastavenie je možné, pokiaľ na displeji svieti príslušné označenie:

„**F**“ = frekvencia, možné nastaviť nasledovné frekvencie: 14 Hz, 60 Hz, 90 Hz, 340 Hz, tlačidlami + a -, podľa toho, či požadovaná frekvencia má byť vyššia alebo nižšia

„**FM**“ – funkcia automatického striedania frekvencie, vypnutie a zapnutie funkcie sa nastavuje tlačidlami + a -, pričom 0 = funkcia je vypnutá, 1 = funkcia je zapnutá

„**D**“ = funkcia dóza, vypnutie a zapnutie sa nastavuje tlačidlami + a -, pričom 0 = funkcia je vypnutá, 1 = funkcia je zapnutá

„**AM**“ = funkcia menenie amplitúdy, vypnutie a zapnutie sa nastavuje tlačidlami + a -, pričom 0 = funkcia je vypnutá, 1 = funkcia je zapnutá

„**P**“ = preset, vypnutie a zapnutie sa nastavuje tlačidlami + a -, pričom 0 = funkcia je vypnutá, 1 = funkcia je zapnutá

Energiu impulzu = „**A**“ je možné nastaviť, keď na displeji nesvieti označenie žiadnej z vyššie uvedených funkcií, pričom tlačidlom + sa energia pridáva a tlačidlom – sa energia uberá

#### **Kontraindikácie:**

V nasledujúcich prípadoch sa prístroj nesmie použiť bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom:

- kardiostimulátor a iné elektronicky riadené prístroje v tele alebo na tele,
- tehotenstvo,
- onkologické ochorenia.

#### **Postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii:**

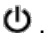
Po každom klientovi je potrebné vykonať mechanickú očistu a dezinfekciu prístroja jeho utretím vatovým tampónom s dezinfekčným prípravkom s minimálne 60%ným obsahom liehu. Sterilizácia prístroja nie je možná.

### **2. Prístroj Reboots**

## Návod na použitie:

Prístroj v prevádzke môže používať iba určený zaškolený terapeut.

## Ovládanie prístroja:

Vypnutie a zapnutie prístroja sa vykonáva tlačidlom .

V sekcii „Time“ je možné tlačidlami + a – nastaviť požadované trvanie činnosti prístroja.

V sekcii „Pressure“ je možné tlačidlami + a – nastaviť požadovaný tlak pri činnosti prístroja.

V sekcii „Programme“ je možné zvoliť si požadovaný program a to posúvaním sa medzi jednotlivými programami cez šípku napravo.

V sekcii „Individual pressure“ je možné nastaviť tlak jednotlivo pre každú komoru zvlášť.

V sekcii „Hold“ je možné nastaviť podržanie tlaku po nafúknutí komory.

V sekcii „Interval“ je možné nastaviť trvanie pauzy medzi jednotlivými cyklami programov.

## Kontraindikácie:

V nasledujúcich prípadoch sa prístroj nesmie použiť:

- onkologické ochorenia (akútne štádia),
- ateroskleróza,
- trombóza,
- glaukóm (očný zelený zákal),
- astma,
- pľúcne ochorenia,
- opuchy spôsobené ochorením pečene, srdca, obličiek,
- vysoký krvný tlak,
- horúčka,
- poruchy látkovej premeny (poruchy metabolizmu sacharidov, tukov a pod.),
- zvýšená činnosť štítnej žľazy,
- akútne vírusové alebo bakteriálne ochorenie
- akútne žilné ochorenie
- silné menštruačné krvácanie

V prípade tehotenstva sa prístroj nesmie použiť bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom.

## Postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii:

Prístroj štandardne neprichádza do kontaktu s ľudskou kožou. Ak sa tak stane, je potrebné vykonať mechanickú očistu a dezinfekciu prístroja dezinfekčným prípravkom. Sterilizácia prístroja nie je možná.